

CLA7



Benutzerhandbuch

Warnung: Dieses Telefon wurde speziell für schwerhörige Personen konzipiert und besitzt eine auf die individuellen Bedürfnisse einstellbare Hörerlautstärke. In Folge dessen sollten alle Nutzer darauf achten, dass der Lautstärkereglер des Hörers, in Rücksicht auf andere Nutzer, auf das niedrigste Niveau gestellt wird. Es ist darauf zu achten, dass unwissende Benutzer mit der Handhabung dieser Apparatur vertraut gemacht werden.


1 – ALLGEMEINES

Die CLA7 Induktionsschlinge für Handys ist für Personen mit Hörgeräten geeignet.

Wenn Sie die CLA 7 verwenden, können Sie sich mit Hilfe des im System integrierten Mikrofons auch direkt mit Ihrem Gesprächspartner unterhalten. Das Gerät funktioniert als drahtloses System.

Kompatibel mit unseren Produkten: AmpliDECT, CL200, CL400, CL600, CL1100, CL1400 & mit den meisten Handys (Wenn Ihr Handy über keinen geeigneten Anschluss für Kopfhörer verfügt, müssen Sie eventuell einen Adapter kaufen).

Vergessen Sie nicht, Ihr Hörgerät auf den Modus T zu schalten.

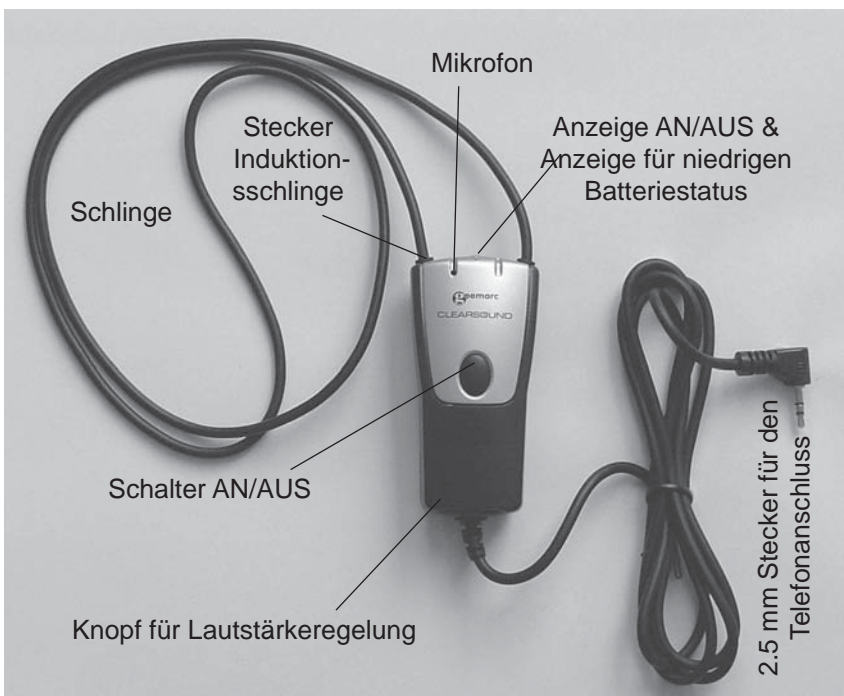

Hinweis:

OFF: LED ist aus

ON: LED ist grün

Niedriger Batteriestatus: LED ist rot

2- ANSCHLUSS

- Öffnen Sie das Batteriefach.
 - Setzen Sie 2 AAA 1,5 V Nischeisenbatterien ohne Quecksilber ein und stellen Sie sicher, dass die Polung der Markierung im Batteriefach entspricht.
 - Verschließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel.
- Jetzt können Sie die CLA 7 verwenden.

Hinweis:

- Trennen Sie immer den Stecker der CLA 7 vom Telefon, bevor Sie die Batterien einsetzen.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll. Achten Sie auf die gesetzlichen Regelungen zur Entsorgung von Batterien.

3 – ANRUF TÄTIGEN UND ANNEHMEN

- Legen Sie die Schlinge um Ihren Hals.
- Verbinden Sie den Stecker mit dem Kopfhöreranschluss Ihres Telefons (*). (Siehe Benutzerhandbuch Ihres Telefons – falls Sie den Anschluss nicht finden).
- Schalten Sie Ihr Hörgerät auf den Modus T.
- Jetzt können Sie über Ihre CLA 7 sprechen. Drücken Sie den Schalter ON/OFF. Das grüne Lämpchen geht an.
- Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke des

Geräts regeln, in dem Sie den Knopf zur Lautstärkeregelung unten an der CLA 7 verwenden.

- Nach Beenden des Gesprächs drücken Sie den Schalter ON/OFF. Das grüne Lämpchen geht aus.

Vergessen Sie nicht, nach Ende des Gesprächs Ihr CLA 7 auf OFF (Aus) zu stellen. Falls Sie das nicht tun, werden die Batterien nach etwa 30 Stunden leer sein. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach Einzelheiten über unsere wieder aufladbaren Hochleistungs-Batterien und Schnellladegeräte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Händler dieses Produkt nicht vorrätig hat, besuchen Sie bitte unsere Website www.geemarc.com oder rufen Sie unsere HOTLINE unter 01707 38 44 38 an.



Für Hilfe und Informationen zu unseren Produkten, besuchen Sie unsere Website

www.geemarc.com

Tel : + 33 (0) 3 28 58 75 75

Fax : + 33 (0) 3 28 58 75 76

Garantie

GARANTIE

Auf Ihr Geemarc Produkt wird von Geemarc Telecom SA eine einjährige Garantie ab Kaufdatum gemäß diesen Garantiebestimmungen gewährt. Während dieser Zeit werden im Garantiefall nach Wahl der Geemarc Telecom SA Material- und Fabrikationsfehler unentgeltlich beseitigt oder Ihr Geemarc Produkt ausgetauscht. Bei Störungen oder Fragen wenden Sie sich an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Homepage www.geemarc.com. Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Dritten, die von Geemarc Telecom SA oder deren Vertriebspartnern dazu nicht ermächtigt wurden. Die Geemarc Telecom SA Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Radio- und Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC, insbesondere Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3, erfüllt.

Das Telefon benötigt eine Mindeststromstärke von 18mA in der Leitung.

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.

